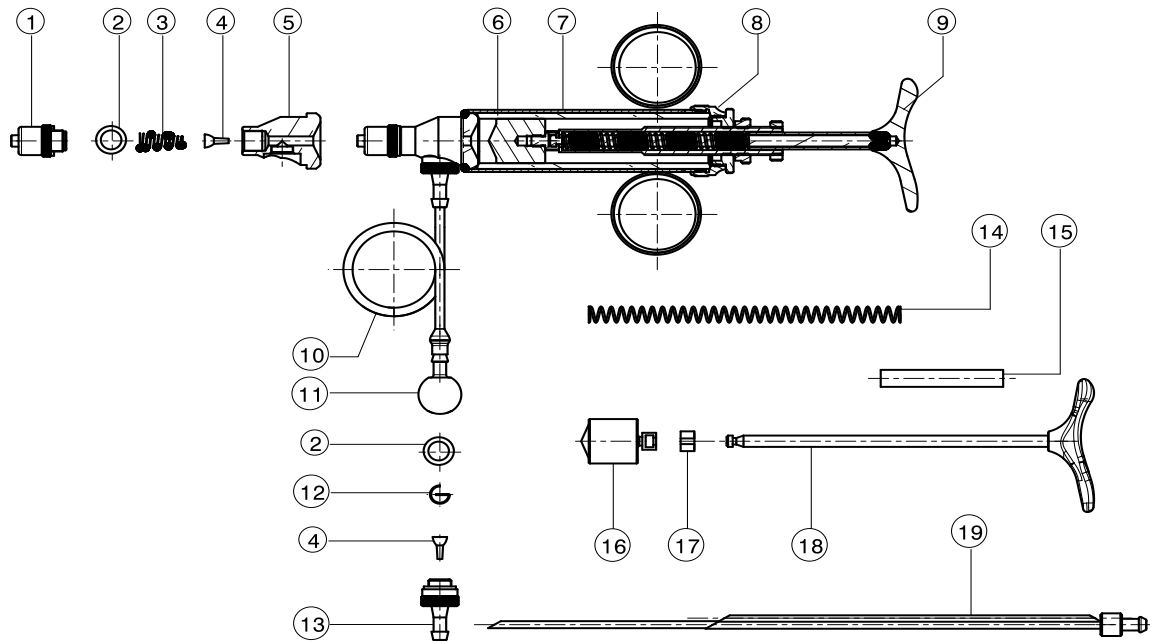


Eingeschränkte Verfügbarkeit / Supply not guaranteed


Nr.	Bezeichnung	Description	Appellation	No.	In set
1	Luer-Lock-Ansatz allein	Luer-Lock adaptor only	Embout Luer-Lock seul	3000037800	-
2	Dichtungsring	Rubber washer	Rondelle	3000000090	2 pcs.
3	Ventil-Druckfeder	Outlet valve spring	Ressort à pression de soup.	3000000089	1 pce.
4	Gummiventilkegel	Rubber valve	Soupape en caoutchouc	3000830000	2 pcs.
5	Vorderteil allein	Front piece only	Embout seul	3000000092	-
6	Glaszylinder	Glass barrel	Cylindre en verre	2410200100	-
7	Hülse komplett	Barrel housing cpl.	Capuchon cpl.	3005000316	-
8	Schraubkappe	Screw cap	Capuchon de vis à tube	3005000313	-
9	Krücke	Crutch handle	Béquille	82149745	-
10	PVC-Schlauch 0,92 m	Rubber tube 0,92 m	Tuyau 0,92 m	3091820000	-
11	Saugfuss	Suction piece	Plongeur	3500790000	-
12	Haltefeder	Inlet valve retaining spring	Ressort de rétention	3000000145	1 pce.
13	Schlauchansatz kpl.	Tubing attachment cpl.	Raccord de tuyau	3000000022	-
14	Druckfeder	Compressing spring	Ressort à pression	3000000311	-
15	Distanzhülse	Distance sleeve	Capuchon de distance	3005100318	-
16	Kolben mit Schraube	Piston with screw	Piston avec vis	3005000314	-
17	Sicherungshülse	Safety sleeve	Manchon d'arrêt	8300016655	-
18	Kolbenstange komplett	Piston rod complete	Tige de piston cpl.	3005000310	-
19	Steigrohr 21 cm	Ascending needle 21 cm	Tube à l' ascension 21 cm	3021760000	-
-	Ersatzteilset	Spare part set	Set pièces de rechange	3000000319	
	Achtung:	Spritze wird heute nicht mehr hergestellt. Ersatzteile nur noch teilweise verfügbar!!			
	Attention:	Syringe is not longer produced. Spare part supply only upon request and availability!!			